

自宅で簡単

約10分

新型コロナウイルス 抗原検査キット

SAFE CHECK

唾液専用

SAFE CHECKで「不安」を「安心」に。

人が集まる場所や帰省・他地域への移動 / 無症状でも感染していないが知りたい

唾液専用

SAFE CHECK



12,000円 (税込)

新型コロナかもしれない
症候群

- 味覚が変わった
- 頭痛がする
- 目の充血(結膜炎)
- 倦怠感がある
- 空咳がでる
- 関節の痛み(喉の痛み)
- 圧迫感
- 下痢

お申し込み

「ファックス」または「メール」でお申し込みください。

FAX



028-688-8200

FAXでのご注文：以下の記入欄に必要事項を入力して上記のFAX番号まで送信してください。

MAIL



kdo118@outlook.jp

メールでのご注文：「新型コロナウイルス 検査キット」と入力
のうえ、以下のお申し込みの項目も入力し、送信してください。

新型コロナウイルス 抗原検査キット お申し込み					
ふりがな		ふりがな		TEL	()
お名前		団体名		FAX	()
発送先	〒			E-mail	
商品数量	新型コロナウイルス抗原検査キット SAFE CHECK (唾液専用) 12,000円(税込)			セット	

抗原検査手順

1



キットが全て揃っているか確認する。
※開封後は1時間以内に使用してください。

2



唾液採取容器に専用ストローで唾液を流し込んでください。真ん中の線(3ml)まで唾液が溜まったら、検体採取用スワブを浸して1分程かき混ぜる様に染み込ませてください。

3



唾液に浸したスワブを、今度は検査液に浸しながらかき混ぜます。1分程かき混ぜた後、くびれ部分を前後に曲げて折り入れ、検査液の中に沈めてください。

4



しっかりとフタをして数回振り、スワブと保存液を馴染ませ、1分程待ちます。

5



保存液の先端のキャップを開けて、「S」部分に3～4滴ほど滴下してください。液が余った場合は保存液に戻してください。

6



保存液の滴下後、10～15分程で結果が確認できます。「C」のラインが出ない場合は無効です。別キットにて再検査してください。

陽性反応がでたら医療機関に相談

「陽性」反応が出た方は、医療機関に相談して下さい。

「陰性」の場合も、症状から感染が疑われる場合には迷わず医療機関に相談してください。

使用上の注意

- ・本製品は、日本において体外診断用医薬品としての承認を受けたものではなく、研究用試薬です。診断目的で使用することはできません。
- ・検体採取が不適切である場合には偽陰性が出やすくなります。
- ・すべてのPCR検査が感染状態を完全に正しく判定できるものではないことも含めて、本製品の検査結果とPCR検査の結果の一致を保証することはできません。
- ・一度使用した本製品は、感染防止策に配慮して適切に廃棄してください。再使用はできません。